

Pflegebetten-Serie Dali: So funktioniert das Pairing des kabellosen Handschalters

Mit der Pflegebetten-Serie Dali ist ein Stück Digitalisierung im Pflegezimmer angekommen - so sorgt der kabellose Handschalter per Bluetooth für mehr Flexibilität im Pflegealltag. Wie Sie den Handschalter mit der Steuerung verbinden erklären wir Ihnen gerne in unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung.

1. Schritt: Entfernen Sie den Sperrmagnet vom Handschalter und stecken Sie das Netzteil in die Steckdose. Nun haben Sie ein Zeitfenster von 20 Sekunden, um den Pairing-Vorgang wie folgt abzuschließen.



2. Schritt: Halten Sie den Handschalter nahe zur Rückenlehne des Bettes und drücken Sie die beiden Tasten für die Höhenverstellung gleichzeitig für mindestens 5 Sekunden.

3. Schritt: Warten Sie etwas 20 Sekunden während die Bluetooth Verbindung hergestellt wird.



4. Schritt: Testen Sie die Funktion, indem Sie die linke obere Taste des Handschalters drücken. Fährt die Rückenlehne nach oben, ist der Vorgang erfolgreich abgeschlossen.

Das Pairing war nicht erfolgreich?

Wenn die oben beschriebene Anleitung nicht funktioniert hat, wiederholen Sie diese oder gehen Sie bitte wie folgt vor:

Ziehen Sie das Netzteil wieder aus der Steckdose und warten Sie bis die Leuchtdiode am Netzteil erloschen ist.

Hängen Sie den kabellosen Handschalter an der Seitensicherung des Pflegebettes ein.

Drücken Sie mit der einen Hand beiden Tasten in der zweiten Reihe des Handschalters (siehe 2.Schritt) und stecken Sie gleichzeitig mit der anderen Hand das Netzteil wieder in die Steckdose (ggf. muss das Pflegebett an die Steckdose geschoben werden).

Warten Sie 20 Sekunden und führen Sie nochmals den Funktionstest (4. Schritt) durch.

Sollte das Pairing immer noch erfolglos sein, reinigen Sie die Batterie, indem Sie den Deckel an der Rückseite des Handschalters mithilfe einer Münze öffnen. Überprüfen Sie auch, ob die Steuerung funktionsfähig ist, indem Sie das LED-Licht an der Steuerbox kontrollieren. Die Steuerbox befindet sich unter der Rückenlehne des Pflegebettes. Sollte kein Licht leuchten, kontaktieren Sie uns bitte.

Selbstverständlich helfen wir Ihnen auch gerne am Telefon weiter. Sie erreichen uns unter unserer kostenlosen Service-Hotline 0800 888 90 80 von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr.