



BA-Nr.: 01.07.080/2023-07-A01



REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH
DE-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59
Telefon: 05431/9416-0
Telefax: 05431/9416-66
Web: www.rebotec.de
E-Mail: info@rebotec.de



Bedienungsanleitung

Dusch- und Toilettenrollstühle

	Denver	Atlanta	Chicago	Dallas
REF	360.XX.12	361.XX.12	358.XX.12	359.XX.12
	175 kg	175 kg	200 kg	200 kg

xx = Farbcode



Abbildung ähnlich



Bedienungsanleitung **vor Erstgebrauch lesen** und für den Benutzer weiterhin bereithalten, sowie für spätere Verwendung aufbewahren und bei Weiterverkauf beifügen.

**Inhaltsverzeichnis**

1	Artikelbeschreibung.....	3	13	Reinigung & Desinfektion	9
1.1	Einleitung	3	13.1	Allgemeines.....	9
2	Leistungsmerkmale.....	3	13.2	Reinigung	9
2.1	Zweckbestimmung	3	13.3	Desinfektion	9
2.2	Einsatz.....	3	14	Wartung	10
2.3	Lagerung & Transport.....	4	15	Ersatzteile & Zubehör	11
2.4	Ausstattung und Funktionen	4	16	Skizze & Abmessungen.....	12
2.5	Verpackung.....	4			
2.6	Entsorgung	4			
3	Symbole & Typenschilder.....	4			
4	Sicherheitshinweise	4			
5	Meldung von Vorfällen	5			
6	Garantie.....	5			
6.1	Reklamation	5			
7	Wiedereinsatz, Lebensdauer	6			
8	Lieferumfang.....	6			
9	Gebrauchszustand herstellen	6			
9.1	Umklappen der Fußstützen	6			
9.2	Anpassen Fußauflagenhöhe	6			
9.3	Montieren der Rückenlehne	6			
10	Produktdaten	6			
11	Bedienung des Artikels.....	7			
11.1	Hinsetzen	7			
11.2	Aufstehen.....	7			
11.3	Schwenken der Armlehnen	7			
11.4	Abnehmen der Fußstützen	8			
11.5	Abnehmen des Dusch-/ Toilettensitzes	8			
11.6	Handhabung-Toiletteneimer	8			
11.7	Bedienung der Feststellbremse.....	8			
11.8	Überfahren einer Toilette.....	8			
11.9	Stabilisatorstrebe entfernen	8			
12	Beseitigung von Störungen.....	8			

1 Artikelbeschreibung

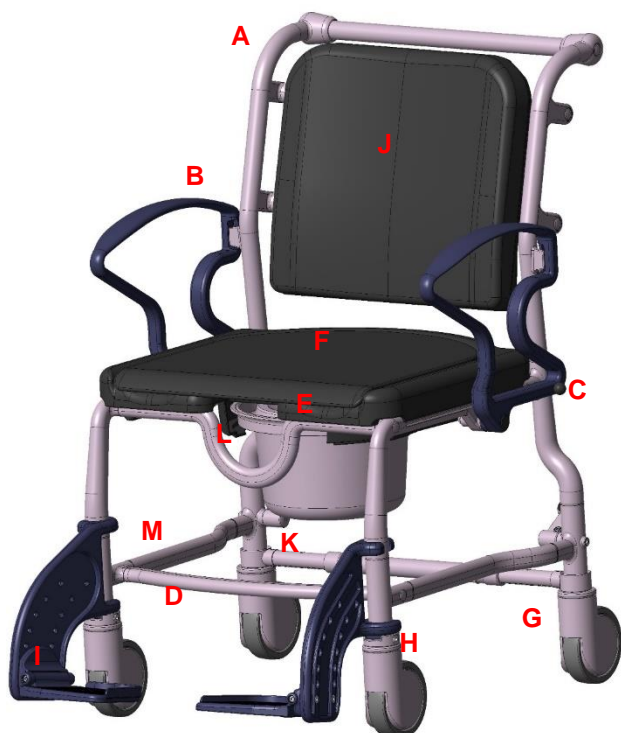


Abbildung zeigt:

A	Rückenlehne
B	Armlehne
C	Rastbolzen
D	Stuhlrahmen
E	PUR-Sitz, Pflegeöffnung
F	PUR-Sitzpolster
G	Radeinsatz gebremst
H	Radeinsatz ungebremst
I	Fußstütze mit Fußauflage
J	Rückenpolster
K	Stabilisator Klemmstrebe mit Clip
L	Eimeraufnahme
M	Typenschild

1.1 Einleitung

- Bei dem hier beschriebenen Artikel handelt sich, gemäß **(EU) 2017/745 MDR**, um ein Medizinprodukt der Risikoklasse I.
- In dieser Bedienungsanleitung finden Sie Informationen und Hinweise zur Inbetriebnahme, Benutzung, Wartung und Pflege des Artikels.
- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie den Artikel benutzen. Beachten Sie, die Sicherheitshinweise, und handeln Sie danach.

2 Leistungsmerkmale

2.1 Zweckbestimmung

Denver, Atlanta, Chicago, Dallas

- Der Artikel dient der Pflege von Patienten mit eingeschränktem Steh- und Gehvermögen. Er ermöglicht das Duschen im Sitzen, sowie den Toiletengang, wenn eine konventionelle Toilette nicht erreicht werden kann. Es muss eine ausreichende Sitzfähigkeit und Oberkörpermuskulatur gegeben sein. Ggf. muss eine Pflegekraft während der Anwendung zugegen sein. Für längeres Sitzen und längeren Transfer ist der Artikel nicht konzipiert.

Spezifikation:

- Maximales Nutzergewicht
 - Denver / Atlanta: 175kg
 - Chicago / Dallas: 200kg
- Höhenverstellbare Fußrasten
- Rollstuhl, 2 Lenkrollen blockierbar
- Einsatz im Innenbereich

Indikation

- Anwendung im häuslichen und stationären Bereich.
- Medizinischer Zustand des Patienten:
- Die Benutzung eines Stuhles von Patienten mit kognitiven Störungen (verringerte Fähigkeiten hinsichtlich geistig, physisch, sensorisch oder mental) ist vorab durch ärztlichen Entscheid (Verschreibung des Produktes) bzw. vor Ort von der Pflegekraft zu entscheiden.

2.2 Einsatz

- Temperaturbereich: 5°C bis 35°C Eine direkte Strahlungswärme auf den Artikel ist zu vermeiden.
- Luftfeuchtigkeit: 40% bis 75%. Außerhalb dieser Bedingungen ist der Artikel nur kurzzeitig einsetzbar.
- Der Artikel ist nicht im Schwimmbad oder einer Sauna verwendbar, da Oberflächenverfärbungen und Einschränkungen der mechanischen Festigkeit entstehen können.
- Schwere Gegenstände dürfen mit dem Artikel nicht transportiert werden.
- Die Stühle sind für längeres Sitzen nicht geeignet.
- Es muss eine ebene Stellfläche in ausreichender Größe vorhanden sein. Siehe 16.
- Die Artikel können über eine handelsübliche Toilette geschoben werden. Siehe 16.

- Einsatz im häuslichen und Stationären Bereich.

2.3 Lagerung & Transport

- Temperaturbereich: 5° C bis 25° C. Eine direkte Strahlungswärme auf den Artikel ist zu vermeiden.
- Den Artikel in trockenen Räumen bei einer Luftfeuchtigkeit bis 65% lagern.
- Die Dusche sollte so gestaltet sein, dass eine ebene Stellfläche in ausreichender Größe vorhanden ist.

2.4 Ausstattung und Funktionen

- Die Stühle bestehen aus einem Kunststoffrahmen auf 4x5“ Lenkrollen mit Feststellbremse hinten.
- Die Armlehnen sind schwenkbar und haben eine Armlehnen Verriegelung.
- Die Fußstützen sind höhenverstellbar; lassen sich abnehmen und umklappen.

2.5 Verpackung

- Wir empfehlen Ihnen die Umverpackung, für spätere Transportzwecke aufzubewahren.
- Abmessungen:
 - Denver / Atlanta: 780mm x 640mm x 780mm
 - Chicago / Dallas: 780mm x 640mm x 780mm

2.6 Entsorgung

- Die Entsorgung und Recycling benutzter Produkte und Verpackungen müssen gemäß den geltenden Vorschriften erfolgen. Erkundigen Sie sich bei einem Entsorgungsunternehmen.
- Das Infektionsschutzgesetz ist zu beachten.
- Beachten Sie die Kennzeichnungen auf den Verpackungsmaterialien und handeln Sie danach.

3 Symbole & Typenschilder

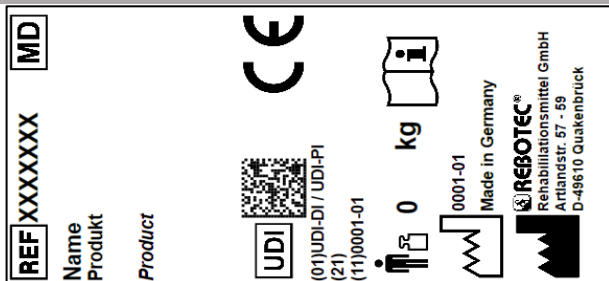


Abbildung ähnlich.



Das Typenschild darf nicht entfernt werden! Zur Ersatzteilbestellung und Reklamationsbearbeitung werden Produktname, Seriennummer und Baujahr benötigt.

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Anleitung lesen!		Baujahr Produkt
SN	Seriennummer		Wichtige Information!
REF	Artikelnummer		Maximales Nutzergewicht in kg
	Pflegehinweis		Wartungshinweis
	Nur im Innenbereich anwendbar.		Hersteller
	Visuelles Signal	DE	Sprache
	Bedienungsanleitung lesen!		Nicht in Hausmüll entsorgen.
CE	Produkt entspricht (EU) 2017/745 MDR		
	Vorsicht! Sicherheitshinweise beachten		
UDI	Unique Device Identifier (Daten: GTIN / LOT (SN) / Baujahr)		
MD	Medical Device-Kennzeichen Bei dem Artikel handelt es sich um ein Medizinprodukt.		

4 Sicherheitshinweise



Folgende Sicherheitshinweise beachten:

- Vor der Erstinbetriebnahme ist die Bedienungsanleitung vollständig zu lesen, um Schäden durch Fehlbedienung oder Gefährdungen zu vermeiden.
- Vor jeder Inbetriebnahme überprüfen Sie, ob am Artikel erkennbare Schäden vorhanden sind.
- Bei Funktionsstörungen oder Beschädigungen jeglicher Art darf der Artikel nicht verwendet werden.
- Lassen Sie den Patienten während der Anwendung nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Artikel unbeaufsichtigt.

Vorsicht Sturzgefahr!

- Der Stuhl darf beim Sitzen und Fahren nur mit eingerasteten Armlehnen verwendet werden.
- Das Hinsetzen, Aufstehen, Umsetzen eines Patienten sollte, je nach Gesundheitszustand des

Patienten, mithilfe einer geschulten Pflegeperson erfolgen.

- Die Benutzung des Stuhles von Patienten, die zu unkontrollierten Handlungen oder Bewegungen neigen, darf nicht ohne Aufsicht erfolgen.
- Das Befahren von Gefälle oder Steigung darf **nur** mithilfe einer Pflegeperson erfolgen. Generell sollte eine Steigung vorwärts und ein Gefälle rückwärts befahren werden.

Vorsicht Abrutschgefahr!

- Kontrollieren Sie vor dem Benutzen, ob die Sitzfläche fest im Sitzrahmen eingeklemmt ist.
- Betätigen Sie vor der Benutzung des Stuhles die Feststellbremsen, um ein Wegrollen des Stuhles zu verhindern.
- Beim Hinsetzen nicht vorne auf die Sitzkante bzw. auf das Sitzpolster setzen, sondern die ganze Sitzfläche einnehmen.

Vorsicht Kippgefahr!

- Der Stuhl darf beim, Sitzen und Fahren nur mit eingerasteten Armlehnen verwendet werden.
- Der Stuhl darf nur am Schiebegriff geschoben werden.
- Die Fußstützen sind vor dem Hinsetzen / Aufstehen abzuschwenken bzw. hochzuklappen. Nicht auf die Fußstützen stellen!
- **Nicht** gegen Türschwellen, Kanten oder andere Unebenheiten fahren.
- **Nur** im Innenbereich und auf flachen, rutschfesten Untergrund verwenden.
- **Nur** im gemäßigten Schrittempo fahren.
- Zu keiner Zeit aus dem Stuhl hinauslehnen. Bei ungünstiger Stellung der Lenkrollen (nach innen weisend) wird die Standfähigkeit eingeschränkt.

Vorsicht Bruchgefahr!

- Der Artikel ist **nur** für den Verwendungszweck geeignet. Beachten Sie das zulässige max. Körpergewicht. Siehe 2.
- Tragen bzw. heben Sie den Artikel niemals, während ein Patient darauf sitzt.
- Nicht an zusätzlich angebauten Bauteilen oder Zubehör ziehen bzw. festhalten.

Vorsicht Klemmgefahr!

- Lassen Sie den Patienten während der Anwendung nicht unbeaufsichtigt.
- Greifen Sie beim Hoch- und Herunterklappen der Armlehnen nicht in die Gelenkführung, damit keine

Körperteile usw. eingeklemmt werden. Stecken Sie keine Körperteile in die Armlehnen.

- Achten Sie beim Umklappen der Fußstützen darauf, dass ein Einklemmen von Körperteilen vermieden wird. Stecken Sie keine Körperteile in die Aussparung im Fersenbereich.
- Beim Herausziehen und Einschoben des Toiletteneimers besteht Klemmgefahr der Weichteile. Zur Vermeidung von Verletzungen darf der Eimer nur herausgezogen oder eingeschoben werden, wenn kein Nutzer im Stuhl sitzt.

Vorsicht Verletzungsgefahr!

- Bei Oberflächentemperaturen > 40°C besteht Verletzungsgefahr. Setzen Sie deshalb den Artikel keiner zu hoher Temperatur aus (z.B. Sonneneinstrahlung, Heizkörper, heißem Wasser). Lassen Sie den Artikel vor der Benutzung abkühlen.



Bei Benutzung des Artikels, durch Anwender mit unempfindlicher Haut (keine Temperaturwahrnehmung oder Hautschäden) ist durch das Pflegepersonal eine Wärmekontrolle (z.B. Berührung mit Handrücken) durchzuführen.

5 Meldung von Vorfällen

- Schwerwiegende Vorfälle in Zusammenhang mit dem Artikel, sind unverzüglich dem Hersteller und dem BfArM zu melden.
 - Nutzen Sie die Meldefunktionen und Formulare.
- Hersteller: pms@rebotec.de

6 Garantie

- Der Artikel hat eine Herstellergarantie von 12 Monaten. Voraussetzung sind die allgemeinen AGBs (www.rebotec.de/agbs), sowie die bestimmungsgemäße Verwendung. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.
- Eigenmächtig durchgeführte Änderungen an diesem Artikel, führen zum Erlöschen der Produktkonformität und zum Verlust der Garantie.

6.1 Reklamation

- Bitte nehmen Sie vor einer Rücksendung Kontakt zu uns auf.
- Um Transportschäden zu mindern, verwenden Sie möglichst die Originalverpackung.
- Das Infektionsschutzgesetz ist einzuhalten.
- Stellen Sie sicher, dass von dem Artikel bei Rücksendung keine Infektionsgefahr ausgeht.

- Kennzeichnen Sie den Artikel mit dem beiliegenden Infoblatt zur Unbedenklichkeit.
- Für Rücksendungen, die nicht als unbedenklich gekennzeichnet sind, fallen ggf. Kosten an.

7 Wiedereinsatz, Lebensdauer

- Der Artikel ist für den Wiedereinsatz geeignet. Die Anzahl der Wiedereinsätze ist abhängig von der Nutzungsintensität und Nutzungsweise des Artikels.
- Vor dem Wiedereinsatz ist der Artikel hygienisch aufzubereiten und die technisch, funktionelle Sicherheit des Artikels zu prüfen und ggf. wiederherzustellen. Siehe 0.
 - Weitere Informationen sind der Aufbereitungsanleitung (01.12.156) und der Wartungsanleitung (01.11.150) zu entnehmen.
 - Die Dokumente können unter folgendem Link heruntergeladen werden.
 - www.rebotec.de/downloads
- Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch beträgt die Produktlebensdauer 5 Jahre. Die effektive Lebensdauer kann, abhängig von der Intensität des Gebrauchs und des Allgemeinzustandes, variieren. Eine längere Lebensdauer ist bei geringerer Nutzungsintensität möglich.

8 Lieferumfang

- 1 Dusch-/Toilettenrollstuhl
- 1 Bedienungsanleitung (01.07.080)
- 1 Innensechskantschlüssel

Aufbereitungs- und Wartungsanleitung können Sie bestellen oder auf www.rebotec.de/downloads ansehen und herunterladen.

9 Gebrauchszustand herstellen

- Der Artikel wurde im Werk auf Fehlerfreiheit und Vollständigkeit geprüft. Bitte prüfen Sie den Artikel nach Erhalt auf eventuelle, während des Transportes aufgetretene Schäden und auf Vollständigkeit des Lieferumfanges. Der Aufbau bzw. die Einstellung erfolgt durch den Fachhändler.


9.1 Umklappen der Fußstützen

- Drehen (1) Sie die Fußstützen so weit nach vorne bis diese selbstständig einrasten. Klappen (2) Sie die Fußauflagen nach unten. Eventuell die Fußauflagenhöhe einstellen.



9.2 Anpassen Fußauflagenhöhe

- Die Fußauflage ist 7-fach höhenverstellbar. Schrauben Sie seitlich der Schrauben an der Fußstütze mit einem Innensechskantschlüssel (SW 5) heraus. Wählen Sie die entsprechende Stufe (1-7) aus und schrauben die Fußauflage wieder fest. Achten Sie auf einen festen Sitz der Schrauben!

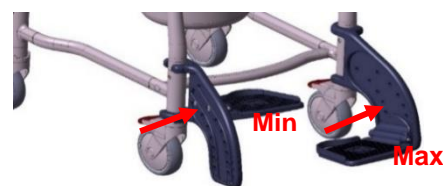

9.3 Montieren der Rückenlehne



- Die Armlehnen müssen für die Montage der Rückenlehne nach hinten geschwenkt sein.
- Stecken Sie die Rückenlehne auf die Rohre und schwenken Sie die Armlehnen anschließen nach vorne, bis die Bolzen einrasten.

10 Produktdaten

- Änderungen durch technische Weiterentwicklungen gegenüber der in dieser Bedienungsanleitung Ausführung behalten wir uns vor. Siehe 16.

Bereich	Angabe
Denver	
Produktgewicht*	23,7kg
Gesamtgewicht*	27,3kg
Atlanta	
Produktgewicht*	24,6kg
Gesamtgewicht*	27,8kg
Chicago	
Produktgewicht*	24,4kg
Gesamtgewicht*	28,0kg
Dallas	
Produktgewicht*	25,3kg
Gesamtgewicht*	28,5kg
Hautverträglichkeit	DIN EN 10993-1/-5
Entzündbarkeit	DIN EN 1021-1/-2

*Ohne Zubehör.

**Flammhemmend: Bei Artikeln aus PUR-Material.

11 Bedienung des Artikels

- Vor der Benutzung muss sichergestellt sein, dass der Artikel sich in einem ordnungsgemäßen Gebrauchszustand befindet. Sind Mängel oder Fehlfunktionen erkennbar, darf der Artikel nicht verwendet werden. Lassen Sie die Mängel vor dem Einsatz von einem Fachhändler beheben.



Falls erforderlich, je nach Einschränkung des Patienten, muss das Hinsetzen und Aufstehen mithilfe einer Pflegeperson erfolgen.

Nachträgliche Einstellungen sind nur durch das Fachpersonal vorzunehmen!

11.1 Hinsetzen

1.



- Vor dem Hinsetzen ist darauf zu achten, dass ein sicherer Stand des Stuhles gegen Wegrutschen und Umkippen gewährleistet ist, beide Räder gebremst sind, die Armlehnen richtig eingerastet sind, der Dusch /Toilettensitz fest aufliegt, die Fußstützen seitlich weggeklappt bzw. hochgeklappt sind.

- Der Patient muss sich möglichst nahe am Stuhl positionieren. Durch Abstützung an den beiden Armlehnen sollte sich der Patient langsam auf das Polster setzen.
- Ist dies bedingt durch seine Einschränkung nicht möglich, muss eine Unterstützung durch das Pflegepersonal erfolgen. Falls notwendig ist der Einsatz einer Aufrichthilfe oder Patientenlifters zweckmäßig



Vorsicht Sturzgefahr!

2.



- Ein Hinabfallen auf dem Stuhlsitz ist zu vermeiden. Der Patient soll möglichst ganz auf der Stuhlfläche sitzen und nicht nur auf der Sitzkante.
- Bei einem Personentransport müssen möglichst die gesamte Fläche der Rückenlehne und die Fußstützen benutzt werden.

11.2 Aufstehen

- Vor dem Aufstehen ist darauf zu achten, dass ein sicherer Stand des Stuhles gegen Wegrutschen

und Umkippen gewährleistet ist, **beide Hinterräder gebremst sind**, die Armlehnen richtig eingerastet sind, die Fußstützen seitlich weg, bzw. hochgeklappt sind und der Patient aufrecht sitzt.

3.



- Der Patient sollte so weit auf der Stuhlfläche nach vorn rücken, dass die Füße auf dem Boden stehen.
- Mit den Armen sich an den Armlehnen abstützen und langsam vom Sitz erheben.

- Den Körper nicht zu weit nach vorne lehnen, damit eine mögliche Sturzgefahr vermieden wird.

- Der Patient sollte sich durch das Pflegepersonal beim Aufstehen helfen lassen.



Vorsicht Sturzgefahr!


4.



- Der Patient darf sich beim Hinsetzen oder Aufstehen niemals auf die Fußstützen stellen.

11.3 Schwenken der Armlehnen

- Durch Herausziehen der Rastbolzen (A) wird die Arretierung gelöst und die Armlehnen lassen sich nach hinten schwenken.
- Beim Hochklappen der Armlehne überprüfen Sie den richtigen Sitz der Einrastung an der Rückenlehne (B) und des Rastbolzens (A). Das Schwenken der Armlehnen erfolgt per beidhändiger Bedienung

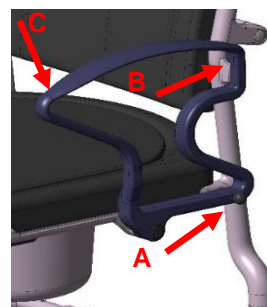

- Halten Sie hierzu während des gesamten Schwenkvorganges Rastbolzen (A) gezogen und führen die Armlehne mit der anderen Hand an Punkt (C). Berühren Sie hierbei nur den Außenbereich und greifen nicht in die Armlehne hinein oder hindurch. Berühren Sie hierbei nur den Außenbereich und greifen nicht in die Armlehne hinein oder hindurch.



Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Kontrolle der Verringerung durch, da durch eventuelle Kalkablagerungen an der Arretierung die Gängigkeit beeinträchtigt werden kann.

11.4 Abnehmen der Fußstützen

- Heben Sie die Fußstütze um ca. 100 mm an und drehen diese um 90 Grad nach außen. Vordere Abdeckkappe am Seitenrahmen lösen.
- Jetzt können Sie die Fußstütze ganz nach oben schieben und herausziehen.

11.5 Abnehmen des Dusch-/ Toilettsitzes

- Der Sitz kann zum Reinigungszweck bzw. Austausch aus seiner Rasterung am Stuhlrahmen durch Anheben abgenommen werden.

11.6 Handhabung-Toiletteneimer

- Schieben Sie von der Rückseite des Stuhls den Toiletteneimer unter den Sitz. Zum Herausnehmen heben Sie den Eimer leicht an und ziehen ihn dann nach hinten heraus.

11.7 Bedienung der Feststellbremse

- Drücken Sie mit dem Fuß die Feststellbremse nach unten. Die Räder sind nun gebremst. Das Lösen der Räder erfolgt durch Anheben des Betätigungshebels mit dem Fuß.



11.8 Überfahren einer Toilette

- Nach Entfernen der Stabilisatorstrebe kann der Stuhl über ein WC-Becken gefahren werden.




Vorsicht-Sicherheitshinweis!

Der Transport eines Patienten ohne die montierte Strebe ist Sicherheitsgründen nicht zulässig.


Nach dem Toilettengang die Strebe unbedingt wieder montieren!

11.9 Stabilisatorstrebe entfernen

- Es müssen beide Hinterräder gebremst sein. Siehe 11.7.
- Entfernen Sie die beiden Clips.

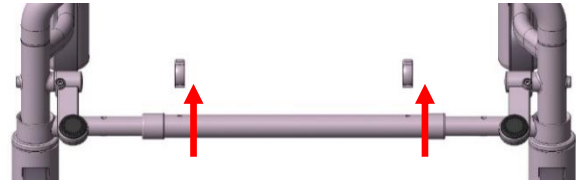

- Schieben Sie das Rohr zur Seite und setzen Sie die Clips wieder ein.

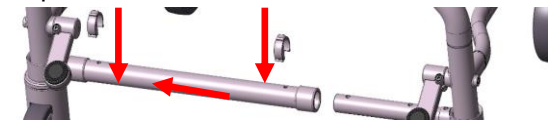

- Nun können die beiden Hälften nach vorne geschwenkt werden.



- Lösen Sie die Bremsen und schieben Sie den Stuhl über die Toilette.
- Nach dem Toilettengang die Stabilisatorstrebe in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren. Die Räder müssen dabei gebremst sein. Siehe 11.7

12 Beseitigung von Störungen

Störung	mögliche Ursache	Abhilfe
Armlehne lässt sich nicht abschwenken	Ablagerung in der Arretierung (Rastbolzen)	Reinigung, regelmäßige Kontrolle
Rastbolzen lässt sich nicht herausziehen	Ablagerungen, Zugfeder klemmt bzw. defekt	Reinigung, Rastbolzen erneuern
Fußraste lässt sich nicht umklappen	Ablagerung im Gelenk, Verspannung	Reinigung, Verschraubung prüfen
Radfeststeller bremst nicht	allgemeiner Defekt	siehe Wartung!

Störung	mögliche Ursache	Abhilfe
Rad dreht sich schwer	Ablagerungen	Reinigung
Rad dreht sich nicht	allgemeiner Defekt	siehe Wartung!
Rad läuft un- rund	starke ungleiche Profilabnutzung	siehe Wartung!
Stuhlrahmen zu instabil	Verschraubung zu lose	Verschraubung: Rahmen, Radeinsätze festziehen
Radeinsatz verbogen	Anfahren gegen ein Hindernis	siehe Wartung!

13 Reinigung & Desinfektion

13.1 Allgemeines



Achtung Klemmgefahr beim Reinigen der Fußrasten!

- Beachten Sie Punkt 4.
- Der Artikel ist nicht für die maschinelle Reinigung und Desinfektion geeignet. Beachten Sie die Aufbereitungsanleitung (01.12.156).
 - Lediglich der Eimer kann maschinell gereinigt und desinfiziert werden.
- Verwenden Sie keine harten Gegenstände, wie Spachtel, Drahtbürsten oder Metallschwämme.
- Beachten Sie den Infektionsschutz. Desinfizieren Sie den Artikel vor dem Wiedereinsatz.
- Mischen Sie keine verschiedenen Reinigungs- & Desinfektionsmittel.

13.2 Reinigung

- Grobe Verschmutzungen müssen umgehend nach dem Einsatz entfernt werden.
- Sitzauflage, Sitz, Beinauflage und Eimer sind vor der Reinigung zu demontieren.
 - Sie müssen separat gereinigt und getrocknet werden.
- Verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel mit einem pH-Wert von 5-9.
- Beachten Sie die Angaben zum Mischungsverhältnis.
- Lassen Sie das Reinigungsmittel nach Herstellerangabe einwirken.
- Entfernen Sie das Reinigungsmittel rückstandslos mit warmem Wasser.

- Wischen Sie den Artikel nach dem Reinigen mit einem feuchten Lappen ab.
- Trocken Sie den Artikel nach der Reinigung mit einem Tuch. Der Artikel darf nur im trockenen Zustand verwendet werden.

Ausschluss:

- Reinigungsmittel dürfen kein Chlor oder starke Säuren enthalten.
- Verwenden Sie keine Reiniger mit Scheuerzusatz.
- Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger.

13.3 Desinfektion

Der Artikel ist nicht für Dampf- oder Heißluftsterilisation vorgesehen.

- Beachten Sie die Einsatztemperaturen (2.2).
- Der Artikel ist nicht für Dampf- oder Heißluftsterilisation vorgesehen. Beachten Sie die Einsatztemperaturen (2.2).
- Verwenden Sie ausschließlich, vom Robert Koch Institut geprüfte und anerkannte Flächendesinfektionsmittel.
 - Zulässig sind Mittel auf (Form) Aldehyd oder Alkohol-Basis.
- Beachten Sie die Materialfreigaben der Desinfektionsmittelhersteller. Der Artikel besteht aus den folgenden Komponenten bzw. Materialien:
 - Polyamid: Gestell, Armlehnen, Fußrasten
 - Polyurethan: Sitz, Rückenlehne, Beinauflage, Kopfstütze
 - Polypropylen: Eimer & Aufnahme
 - Polyethylen: Typenschild
 - Aluminium: Rohre
 - Edelstahl: Schrauben, Scheiben, Muttern
- Beachten Sie die Angaben zum Mischungsverhältnis.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise des Desinfektionsmittelherstellers.
- Tragen Sie das Desinfektionsmittel durch Sprühen oder Reiben flächig auf.
- Lassen Sie das Mittel einwirken. Beachten Sie die angegebenen Einwirkzeiten.
- Je nach Desinfektionsmittel ist ein nachträgliches Abwischen mit warmem Wasser notwendig.

- Entfernen Sie das Desinfektionsmittel rückstandslos.

Ausschluss:

- Keine Mittel auf Alkoholbasis im Bereich der Aufkleber & Typenschilder verwenden.
- Reinigungsmittel dürfen kein Chlor oder starke Säuren enthalten.

14 Wartung

- Nicht rechtzeitig erkannter Verschleiß und / oder unsachgemäße Behandlung, sowie unregelmäßige bzw. keine Wartung können Unfälle verursachen.



*Aus Sicherheitsgründen ist der Artikel **mindestens 1x jährlich** fachgerecht zu warten.*

- Regelmäßige sicherheitstechnische Kontrollen sind erforderlich:
 - Artikel und Zubehör auf sichtbare Beschädigungen prüfen (Risse, Brüche, lose Teile)
 - Standsicherheit vor der Benutzung prüfen
 - Alle Schraubverbindungen auf festen Sitz
 - Funktion der Armlehnen und Rastbolzen
 - Funktion der Fußstütze
 - Laufeigenschaft und Radprofil der Räder
 - Funktion der Feststellbremsen
- Sollten Sie Fragen zur Wartung des Artikels haben, wenden Sie sich an einen Fachhändler oder Sanitätshaus. Bei Beschädigungen oder anfallenden Reparaturen unverzüglich den Fachhändler kontaktieren.
- Nehmen Sie **keine** eigenmächtigen Veränderungen an dem Artikel vor. Dies kann die Sicherheit und Funktion des Artikels beeinträchtigen.
- **Hierfür übernimmt REBOTEC keine Haftung.**
- Bei einer Instandsetzung sind nur Ersatzteile des Herstellers zu verwenden. Siehe Punkt 15.
- Nach einer Wartung oder Instandsetzung führen Sie vor dem Einsatz des Artikels eine Reinigung durch.
- Beachten Sie Punkt 15 und 7.
- *Beachten Sie die Wartungsanleitung (01.11.151)*



Für die Dokumentation der Wartung und Instandsetzung bietet REBOTEC ein Wartungsprotokoll an. Bedienungsanleitung und Wartungsprotokoll können Sie bestellen oder über www.rebotec.de ansehen. Dies ermöglicht auch die

Informationen auszudrucken und bei Bedarf vorzulesen.

15 Ersatzteile & Zubehör


Nr.	Art.-Nr.	Benennung
1	301...	Toiletteneimer mit Deckel
2	302.00	Toilettenbecken für Duschsitz PUR mit Hygieneausschnitt
3	440.10.12	PUR-Auflage Duschsitz
4	440.10.22	PUR-Duschsitz incl. Eimeraufnahme
5	440.50.69	Stabilisatorstrebe
6	442.00.87	Bremshebel, links
7	442.00.86	Bremshebel, rechts
8	442.00.80	Vorderrad 125 für Denver/Atlanta
9	445.00.80	Vorderrad 125 für Chicago/Dallas
10	442.00.81	Hinterrad 125 Totalfeststeller für Denver/Atlanta
11	445.00.81	Hinterrad 125 Totalfeststeller für Chicago/Dallas
12	450.10.05	Armlehnenverriegelung komplett
13	447.XX.57	Fußstütze links, höhenverstellbar
14	447.XX.59	Fußstütze rechts, höhenverstellbar
15	450.10.15	PUR-Rückenpolster Komfort
16	201.00.30	Verstellungsclip 30mm für Stabilisatorstrebe
17	440.10.32	Armlehnepolster PUR
18	322.30.20	Sicherheitsgurt Gr. M/L
19	322.10.50	Aufschiebepolster für Sicherheitsgurte

XX= Farbvariante



Verwenden Sie ausschließlich REBOTEK-Ersatz- und Zubehörteile, um eine einwandfreie und sichere Funktion zu gewährleisten

16 Skizze & Abmessungen

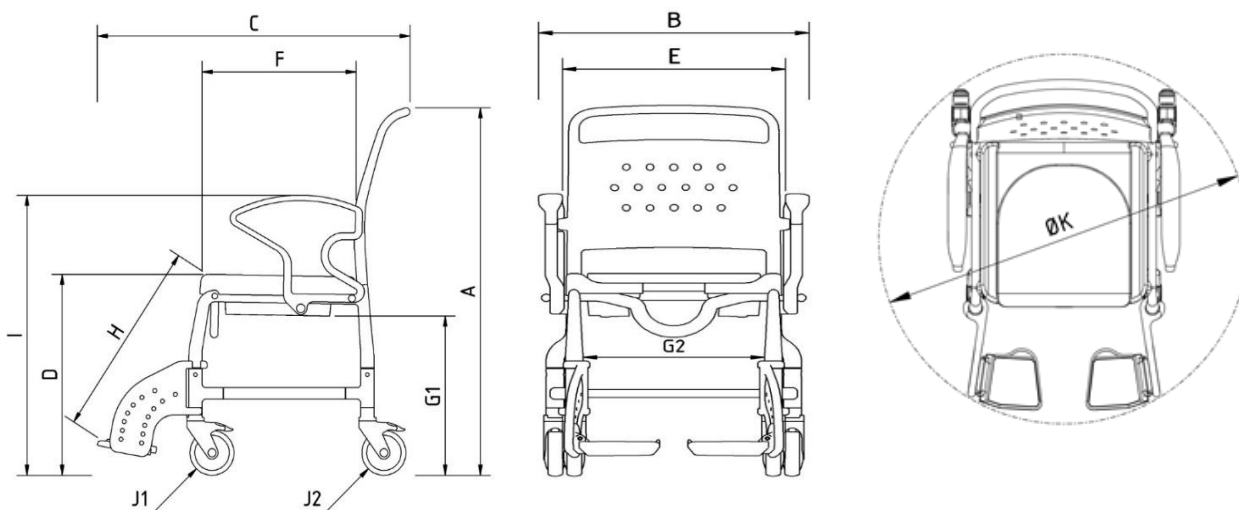

Nr.	Benennung	Denver Maße in mm	Atlanta Maße in mm	Chicago Maße in mm	Dallas Maße in mm
A	Gesamthöhe	1029	1030	1030	1025
B	Gesamtbreite	680	740	680	740
C	Gesamttiefe	965	965	965	965
D	Sitzhöhe	570	570	560	560
E	Breite zwischen den Armlehnen	580	640	580	640
F	Sitztiefe	430	430	430	430
G1	Überfahrhöhe	450	450	440	440
G2	Überfahrbreite	540	540	470	470
H	Höhe/Knie Fußstütze max.	380-560	380-560	380-560	380-560
I	Armlehnenhöhe	780	780	780	780
J1	Vorderraddurchmesser	125	125	125	125
J2	Hinterraddurchmesser	125	125	125	125
K	Wendedurchmesser	1090	1120	1090	1120



Maße und Gewicht variieren je nach Ausstattung. Es können geringfügige Abweichungen durch Fertigungstoleranzen auftreten. Änderungen vorbehalten.

DE


REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH

D-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59

Telefon: 05431/9416-0

Telefax: 05431/9416-66

 Web: www.rebotec.de

 E-Mail: info@rebotec.de


Bedienungsanleitung **vor Erstgebrauch lesen** und für den Benutzer weiterhin bereithalten, sowie für spätere Verwendung aufbewahren und bei Weiterverkauf beifügen.