


Montage und Inbetriebnahme

Griffhöhenverstellung der Gehhilfen

Die Höhenverstellung erfolgt über ein teleskopierbares Aluminiumrohr mit Clip oder Druckknopf.


- Quetschverschraubung (A) durch Linksdrehung lösen.
- Druckknopf (B) in die Bohrung eindrücken bzw. Clip (C) herausziehen.
- Aluminiumrohr in die gewünschte Position verschieben.
- Druckknopf in die Bohrung einrasten bzw. Clip einschnappen lassen.
- Quetschverschraubung (A) durch Rechtsdrehung festdrehen. Durch das Festdrehen vermindern Sie die Geräuschbildung bei der Benutzung.

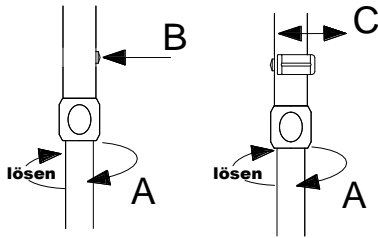

Höhenanpassen der Armschale

Nur bei Modellen mit verstellbarer Armschale.

- Federbolzen (F) in die Bohrung eindrücken.
- Armschale (G) in die gewünschte Position verschieben.
- Federbolzen (F) wieder in die Bohrung einrasten lassen.

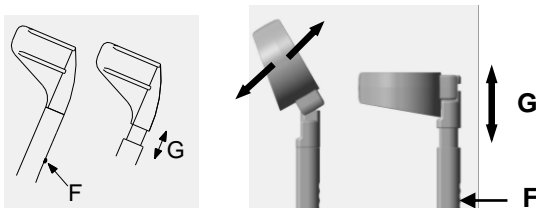

Abstellsystem „Magic-Twin“

Nur bei Modellen mit Abstellsystem.


- Einfach zusammenstecken und steht!
- Optimierung der Abstellsituation.
- Kein Umfallen mehr.



Einstellen des Drehgriffes

Nur bei den Modellen: Comfort und Safe-In-Anatom

- Hülsenmutter (H) im Griff mit Schlüssel (SW 6) lösen.
- Griff durch Drehen in die gewünschte Stellung bringen.
- Hülsenmutter (H) wieder fest anziehen.

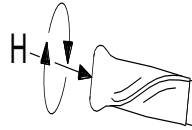

Hinweis! Bei einem Modell mit weichem Griff ist das Anzugsmoment der Hülsenmutter zu überprüfen. Gegebenenfalls die Hülsenmutter mit Inbusschlüssel (SW6) nachziehen.

Pflege


Zur Pflege verwenden Sie ein mildes handelsübliches Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Nach dem Reinigen wischen Sie mit klarem Wasser nach und reiben den Gehhilfe mit einem Tuch trocken ab.

Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Reinigungsmittel (Produkthinweise beachten!) mit aggressiven Lösungszusätzen (Öl, Säuren, Benzin, Verdünner), sowie harte Reinigungsgegenstände (Bürsten), da sonst die Kunststoffoberfläche beschädigt wird oder sich Ablagerungen an Kunststoffteilen und anderen Materialien bilden können.

Bei der Verwendung von Desinfektionsmittel beachten Sie bei der Anwendung die Herstellerangaben!

Wartung

Abgenutzte oder beschädigte Saugkapseln (Verschleißteil) sind umgehend auszutauschen. Ziehen Sie die Saugkapsel vom Ende des Rohres ab. Eine neue Saugkapsel (auf Kapselgröße und Ausführung achten/siehe Tabelle) bis zum Anschlag aufdrücken und den festen Sitz überprüfen.

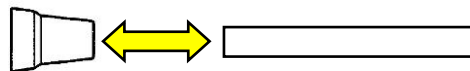

Verbogene oder beschädigte Gehhilfen dürfen nicht weiter verwendet werden, da die erforderliche Stabilität nicht mehr gewährleistet ist. Wegen der Bruchgefahr dürfen Gehhilfen nicht nachgerichtet werden.

Liegt eine Beschädigung der Gehhilfe vor, wenden Sie sich zur Durchführung einer Instandsetzung an einen Fachhändler. **Nur Original-REBOTEC Ersatzteile verwenden.**

Lassen Sie Ihre Gehhilfe mindestens einmal halbjährlich von einem Fachhändler überprüfen.

Entsorgung

Nicht mehr gebrauchsfähige Produkte sind gemäß den nationalen und örtlichen Vorschriften für Umweltschutz und Rohstoffrückgewinnung getrennt vom regulären Hausmüll zu entsorgen. Erkundigen Sie sich bei einem Entsorgungsunternehmen.



Sicherheitshinweise



- **Vor Erstinbetriebnahme die Bedienungsanleitung lesen, um evtl. Schäden durch Fehlbedienung oder Gefährdungen (Restrisiken) zu vermeiden.**
- **Beachten Sie das auf dem Produkt angegebene maximale zulässige Körpergewicht!**
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung die Gehhilfe auf Beschädigungen. Sollten Schäden erkennbar sein, nehmen Sie die Gehhilfe nicht in Gebrauch. Wenden Sie sich an einen Fachhändler zwecks Überprüfung!
- Umfassen Sie bei der Benutzung den Handgriff der Gehhilfe mit einer Hand vollständig und fest.
- Lassen Sie sich nach Möglichkeit von einer Hilfsperson begleiten und stützen, damit Sie diese bei einem eventuellen Fallen auffangen kann.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Saugkapsel auf Beschädigungen und Abnutzung; gegebenenfalls erneuern.
- Die Gehhilfe muss beim Gehen so senkrecht wie möglich aufgesetzt werden. Setzen Sie daher die Gehhilfe nie zu weit vom Körper entfernt auf oder nach vorne in Gehrichtung.
- Die Gehhilfe darf keinesfalls zweckentfremdet werden. Deshalb benutzen Sie diese nur zur Unterstützung der Gehfähigkeit und nicht z.B. als Aufstehhilfe, zum Hebeln, versetzen von Möbeln und anderen Gegenständen.
- Es dürfen keine eigenständigen mechanischen Veränderungen vorgenommen werden (Produkthaftung!).
- An der Gehhilfe keine Gegenstände (Tasche, Beutel, usw.) anhängen.
- Die Gehhilfe nicht über längeren Zeitraum der Sonneneinstrahlung aussetzen (am Fenster, an der Heizung, hinter einer PKW-Scheibe). Hitze kann zu Veränderung der Materialeigenschaften und Haltbarkeit führen.
- Nach längerer Nichtbenutzung: Gehhilfe durch Fachpersonal bzw. Fachhandel überprüfen lassen.
- Gehen Sie niemals mit der Gehhilfe ohne Gleitschützer (Eiskralle) auf schnee- oder eisbedeckten Untergrund.
- Vorsicht bei feuchten Fliesen, Böden oder überqueren von losen Teppichböden, **es besteht Rutschgefahr!**
- Griff(e) oder Saugkapseln niemals mit ölhaltigen Substanzen reinigen, **es besteht Rutschgefahr!**
- Vorsicht bei Unebenheiten oder Löcher im Boden, weil die Gehhilfe dabei unerwartet wegrutschen oder einsinken kann!
- Vorsicht bei der Benutzung der Gehhilfe auf losen Untergrund wie Kies, Sand oder Laub, da der Halt stark eingeschränkt wird!

Gruppe	Modelle	Artikel-Nr.	Verstellung-Clip	Verstellung-Druck	Quetschsystem	Abstellsystem	1-teilige-Armschale	verstellb. Armsch.	geschl. Armschale	Griff-Ergonom	Griff-Anatom	drehbarer Griff	Reflektor*	Unterteil Griffhöhe von-bis/cm	Oberteil Griffhöhe von-bis/cm	Gewicht/kg pro Stück	Kapselgröße/mm	max. Körpergewicht/kg
1	ECO 100	100.20..	X			X				X			A	72-95	24	0,5	17	100
	ECO 120	100.22..		X		X				X			A	72-95	24	0,5	19	120
	MAGIC-TWIN	101...	X			X				X			A	75-98	24	0,5	19	130
	MAGIC-TWIN	102...		X		X				X			A	75-98	24	0,5	19	130
	MAGIC-TWIN	103...	X			X				X			A	75-98	24	0,5	19	130
	MAGIC-TWIN-Überlang	104...	X			X				X			A	85-108	24	0,6	19	130
	MAGIC-SOFT	105...		X		X				X			A	75-98	24	0,6	19	130
	MAGIC-NATUR	105.48		X		X				X			A	75-98	24	0,6	19	130
	MAGIC-SOFT-ANATOM	107...		X		X				X	X		A	75-98	24	0,6	19	130
	COMBI-SOFT	109...		X				X		X			C	75-97	22-25	0,8	19	130
	COMFORT-SOFT	110...		X		X		X		X	X		C	75-97	22-25	0,7	19	130
	COMFORT	112...		X		X		X		X	X		C	75-97	22-25	0,7	19	130
	COMBI	115...		X		X		X		X			B,C	75-97	22-25	0,6	19	130
	SAFE-IN	116...		X		X		X		X	X		B,C	75-97	22-25	0,7	19	130
	SAFE-IN SOFT	117...		X		X		X		X	X		C	75-97	22-25	0,8	19	130
	SAFE-IN-SOFT- ANATOM	118...		X		X		X		X	X		C	75-97	22-25	0,8	19	130
	SAFE-IN- ANATOM	119...		X		X		X		X	X		C	75-97	22-25	0,8	19	130
LIGHT-LINE	120...		X		X		X		X	X		A	75-97	16-21	0,5	17	100	
SAFE-IN-LIGHT	120...10		X		X		X		X	X		A	75-97	16-21	0,5	17	100	
FUN-KIDS	122.		X		X		X		X	X		A	50-78	16-21	0,4	17	100	
SAFE-IN-KIDS	122...10		X		X		X		X	X		A	50-78	16-21	0,4	17	100	

Gruppe: 1=Erwachsene , 2=Jugend und Damen, 3=Kinder / *Reflektor:A=vorne-rot , B=vorne-klar , C=hinten-rot

Produkt-UAG/ Rohre: eloxierte Alu-Legierung / Armschalen: modifiziertes Polyamid (PA6) / (Fertigungstoleranzen-Rohre: +/- 0,5 cm)

Wiedereinsatz

Die REBOTEC Unterarmgehstützen sind für den Wiedereinsatz geeignet. Vor dem Wiedereinsatz sind die Produkte durch den Fachhandel oder durch den Hersteller zu überprüfen, (unter Beachtung der Wartungshinweise), zu reinigen, zu desinfizieren und für den erneuten Einsatz freizugeben.

Wir verweisen auf das Medizinproduktegesetz (MPG) und die Betreiberverordnung (MPBetreibV).

Lebensdauer

Die zu erwartende Lebensdauer des in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Produktes beträgt bei bestimmungsgemäßen Gebrauch, Einhaltung der Sicherheitshinweise, Wartungsintervalle und Pflegehinweise **2 Jahre**.

Über diesen Zeitraum hinaus kann das Produkt nur in einem sicheren Produktzustand weiter verwendet werden. Hierbei sind die Angaben zum Wiedereinsatz (siehe oben) der Unterarmgehstützen zu beachten!



BA-Nr.: 01.01.001/2016-12



REBOTEC® Rehabilitationsmittel GmbH
 DE-49610 Quakenbrück, Artlandstr. 57-59
 Telefon: 05431/9416-0
 Telefax : 05431/9416-66
<http://www.rebotec.de>
 E-mail: info@rebotec.de

Bedienungsanleitung

Gehhilfen



Zweckbestimmung

Die Gehhilfen sind für Personen mit eingeschränkter Gehfähigkeit konzipiert und dienen der Erhöhung der Gangsicherheit. Die Anwendung dieser Gehhilfen kann im Innenraum und außerhalb des Hauses erfolgen. **Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise und das max. Körpergewicht bei der Benutzung der Gehhilfen!**

Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler oder Pflegepersonal in die Benutzung der Gehhilfe einweisen und deren funktionsgerechte Einstellung vornehmen!

Gewährleistung

Auf die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Produkte geben wir eine **Garantie von 24 Monaten**. Hier von sind alle Verschleißteile ausgeschlossen, so wie Schäden bei nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produktes.

Hinweis!

Diese Bedienungsanleitung sowie einen Flyer „Info für den Patienten“ (Nr.: 01.01.067) können Sie über unsere Homepage www.rebotec.de ansehen. Dies ermöglicht Informationen auszudrucken und bei Bedarf vorzulesen.