

Gebrauchsanweisung

Toilettensitzerhöhung

TSE 1



 **DIETZ**[®]
REHA-PRODUKTE

Reutäckerstrasse 12
D-76307 Karlsbad-Ittersbach
Tel. +49 (0) 7248/ 9186 - 0
Fax. +49 (0) 7248/ 9186 - 86

CE

Inhalt

Allgemeine Informationen	3
Vorbemerkungen.....	3
Konformitätserklärung.....	3
Zweckbestimmung.....	3
Indikation.....	4
Zeichen und Symbole	4
Haftung	4
Sicherheitshinweise	4
Produkt- und Lieferübersicht	5
Prüfung der Lieferung	5
Ausstattung der Toilettensitzerhöhung TSE 1.....	5
Kennzeichnung und Typenschilder.....	6
Montage.....	6
Montage der Armlehnen	6
Einstellung der Sitzhöhe	7
Position der Toilettensitzerhöhung	7
Anbringen der Toilettensitzerhöhung.....	8
Benutzung	9
Pflegehinweise für den Benutzer	10
Reinigung	10
Überprüfung der Toilettensitzerhöhung durch den Benutzer.....	10
Störungen/Fehlerbehebung.....	10
Entsorgung	10
Technische Daten	11
Garantie	12

Allgemeine Informationen

Vorbemerkungen

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für eine Toilettensitzerhöhung aus unserem Hause entschieden haben.

Die Toilettensitzerhöhung TSE 1 kann schnell und einfach an fast jedes genormte WC-Becken montiert werden. Sie erlaubt eine Erhöhung der Sitzposition um bis zu 16cm.

Die hochwertige und höhenverstellbare Konstruktion mit ergonomisch geformter Sitzfläche schafft höchsten Sitzkomfort. Die Armlehnen sorgen für zusätzlichen Halt beim Hinsetzen und Aufstehen.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

Sie erhalten wichtige Sicherheitshinweise und wertvolle Tipps zur richtigen Benutzung und Pflege der Toilettensitzerhöhung. Wenn Sie Fragen haben oder zusätzliche Informationen benötigen, wenden Sie sich an den Fachhändler, der Ihnen die Toilettensitzerhöhung geliefert hat.

Diese Gebrauchsanweisung enthält alle notwendigen Hinweise für die Anpassung und Bedienung der TSE 1.

Konformitätserklärung

Für die Toilettensitzerhöhung TSE 1 erklärt die Firma Dietz GmbH in alleiniger Verantwortung die Konformität gemäß der EG-Richtlinie 93/42, für Medizinprodukte.

Zweckbestimmung

Die Toilettensitzerhöhung TSE 1 ist für die Toilettenbenutzung von Personen mit bis max. 120 kg Körpergewicht geeignet.

Die angepasste Höhe der Toilettensitzerhöhung und die beweglichen Armlehnen erleichtern das Überwechseln vom Rollstuhl auf die Toilette erheblich.

Für die Benutzung als Sitzgelegenheit ist die Sitzerrhöhung ungeeignet.



Lassen Sie sich die Bedienung und Funktionen von Ihrem Fachhändler erklären.

Indikation

Die Versorgung mit Toilettenhilfen ist angezeigt bei Personen mit

- Fehlender Rumpfkontrolle
- Gleichgewichtsstörungen
- Funktionsausfällen in den unteren Extremitäten
- Hüft- und Wirbelsäulenversteifte
- Ohnhänder, Tetraplegiker oder Armgeschädigte mit erheblicher Störung der Greiffunktion

Zeichen und Symbole

	Achtung! Bezeichnet besonders sicherheitsrelevante Hinweise. Bedienungsanleitung beachten!
	Wichtig! Bezeichnet besonders nützliche Informationen im jeweiligen Sachzusammenhang.

Haftung

Die Firma Dietz GmbH haftet nur, wenn die Produkte unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgegebenen Zwecken eingesetzt werden. Wir empfehlen die Produkte sachgemäß zu handhaben und entsprechend der Anleitung zu pflegen. Für Schäden, die durch Bauteile und Ersatzteile verursacht werden, die nicht durch die Dietz GmbH freigegeben wurden, haftet die Dietz GmbH nicht. Reparaturen sind nur von autorisierten Fachhändlern oder vom Hersteller selbst durchzuführen.

Sicherheitshinweise

Bei Einhaltung der bestimmungsgemäßen Verwendung geht von der Benutzung der Toilettensitzerhöhung keine Gefahr aus.

Das maximale Benutzergewicht beträgt 120 kg.

Der Deckel der Toilettensitzerhöhung ist nicht zum sitzen geeignet, setzen Sie sich nur auf die Toilettenbrille.

Beim Hinsetzen und Aufstehen können Bekleidungsteile oder Körperteile eingeklemmt werden.

Auch beim Herunterklappen der Armlehnen können Kleidungs - oder Körperteile in den Halterungen eingeklemmt werden.

Achten Sie auf korrekt eingerastete Armlehnen.

Befestigen Sie die Tragstangen vorn und hinten immer in gleicher Höhe.

Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

Produkt- und Lieferübersicht


Prüfung der Lieferung

Die Toilettensitzerhöhung ist komplett in einem Karton verpackt. Bitte bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit auf, sie dient zur evtl. späteren Einlagerung der Toilettensitzerhöhung.

Nach Erhalt der Ware prüfen Sie bitte umgehend den Inhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Der Inhalt besteht aus:

- 1 Umverpackung
- 1 Toilettensitzerhöhung vormontiert
- 2 Armlehnen
- 1 Gebrauchsanweisung

Ausstattung der Toilettensitzerhöhung TSE 1

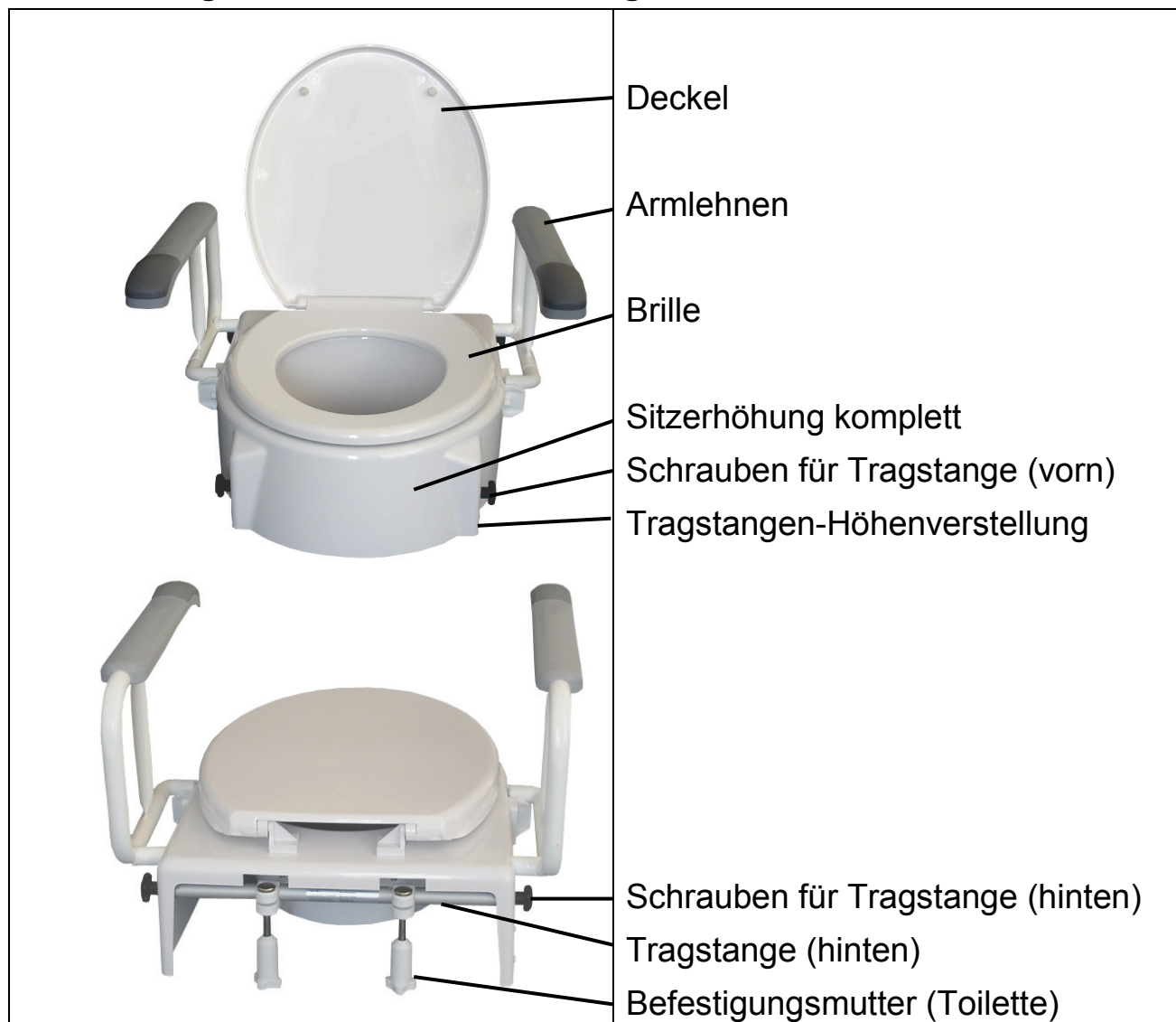

Kennzeichnung und Typenschilder

Typen- und Herstellerschild sind an der hinteren Auflagegestange unter dem Sitz angebracht.



Schilder müssen lesbar bleiben. Unlesbare oder fehlende Schilder unverzüglich ersetzen. Das Typenschild ist für die Identifizierung des Produktes sehr wichtig. Es darf nicht entfernt werden.

Montage



Die Toilettensitzerhöhung kann auf jede übliche Toilettenschüssel montiert werden.



Der Abstand der Toilette bis zur rückseitigen Wand muss mindestens 18 cm betragen um die Armlehnen zurückklappen zu können.




Überprüfen Sie die korrekte Befestigung der Toilettenschüssel, bevor Sie mit der Montage der Toilettensitzerhöhung beginnen.

Montage der Armlehnen

Drücken Sie den Sicherungsknopf ① hinein.

Schieben Sie anschließend das Befestigungsrohr der Armlehne in die Halterung der Toilettensitzerhöhung ②.

Achten Sie darauf, dass der Sicherungsknopf einrastet, nachdem Sie die Armlehnen montiert haben.

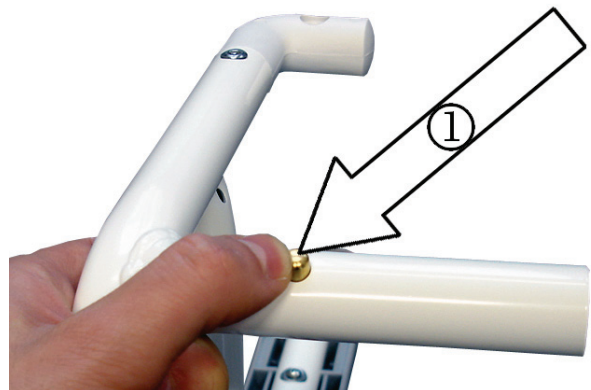

Einstellung der Sitzhöhe


Die Sitzhöhe der Toilettensitzerhöhung kann leicht Ihren Bedürfnissen angepasst werden.

Entfernen Sie zunächst die Lochabdeckungen ①, indem Sie sie von innen herausdrücken.

Schrauben Sie die Schraubknöpfe ② heraus, um die Tragstange abzunehmen.

Bringen Sie die Tragstange in die gewünschte Höhe ③ und Schrauben Sie sie wieder fest.

Befestigen Sie wieder die Lochabdeckungen.

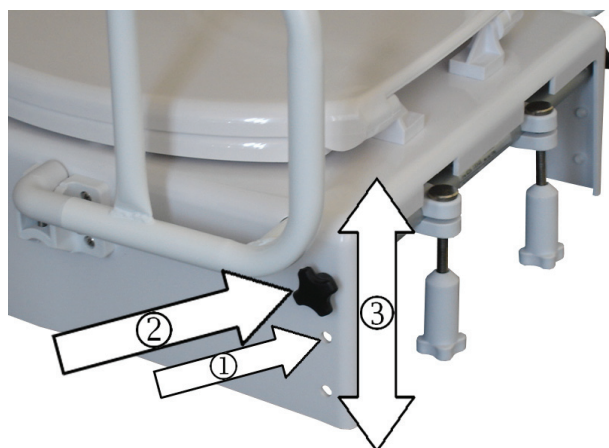


Wiederholen Sie den Vorgang bei der anderen Tragstange, befestigen Sie die Tragstange in gleicher Höhe.

Position der Toilettensitzerhöhung

Die Position der Toilettensitzerhöhung auf der Toilettenschüssel kann leicht nach vorne, bzw. hinten angepasst werden.

Dazu ist es erforderlich die hintere Tragstange um 180° verdreht einzubauen.

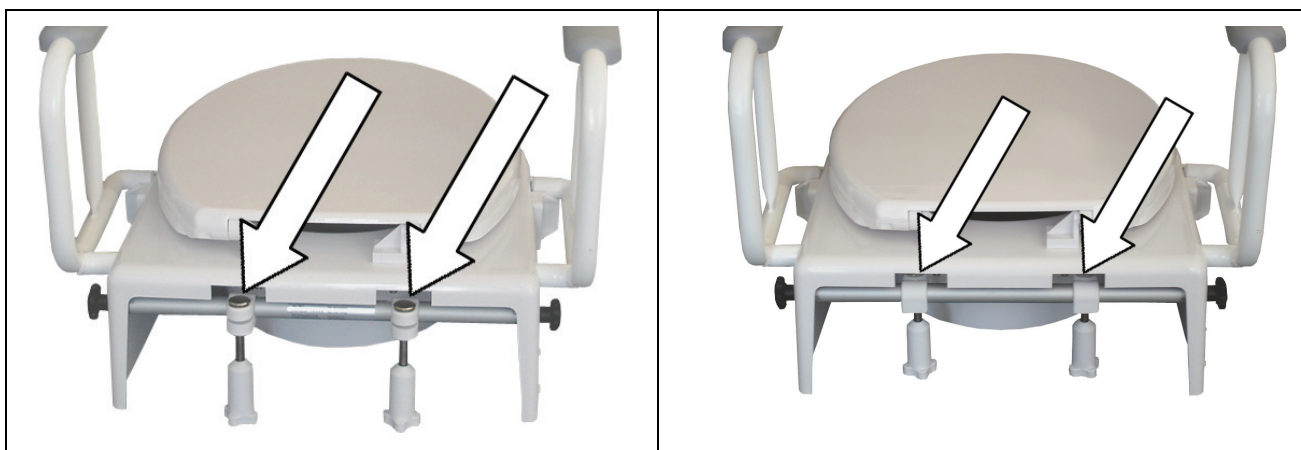

Anbringen der Toilettensitzerhöhung

Um die Toilettensitzerhöhung TSE 1 zu montieren, muss zunächst der alte Toilettendeckel abgeschraubt werden.

Überprüfen Sie ob die werkseitig eingestellte Höhe der Toilettensitzerhöhung Ihren Bedürfnissen entspricht. Legen Sie die Toilettensitzerhöhung dazu zunächst auf die Toilettenschüssel. Sie können die Höheneinstellung verändern.

Beachten Sie dabei, dass Sie die Toilettensitzerhöhung nur so hoch wie nötig montieren. Ihre Füße sollten zu jedem Zeitpunkt auf dem Boden stehen.

Die Toilettensitzerhöhung kann mit wenigen Handgriffen montiert werden.

Schrauben Sie zunächst die Kunststoffmuttern von den Gewindestangen ab.

Stecken Sie die Gewindestangen durch die Löcher in der Toilettenschüssel und ziehen Sie die Mutter zunächst nur locker an.



Positionieren Sie nun die Toilettensitzerhöhung mittig über der Toilettenschüssel, indem Sie die Sitz-erhöhung an den hinteren Halterungen nach links bzw. rechts bewegen.

Ziehen Sie nun die Kunststoffmuttern fest.



Die Sitz-erhöhung muss fest verschraubt sein, sonst kann sich die Erhöhung beim hinsetzen verschieben.



Überprüfen Sie die sichere Montage der Toilettensitzerhöhung mit erhöhter Vorsicht.

Die Demontage der Toilettensitzerhöhung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Benutzung

Zum behutsamen Hinsetzen und Aufstehen von vorn verwenden Sie die Armlehnen.

Beim Umsetzen von der Seite (z.B. Rollstuhl) schwenken Sie die Armlehne an dieser Seite nach hinten weg.

Achten Sie darauf, dass die Armlehnen fest einrasten, wenn Sie sie herunterklappen.



Beim Herunterklappen der Armlehnen können Kleider- oder Körperteile in der Rasterung für die Armlehnen eingeklemmt werden.



Setzen Sie sich, wenn möglich immer gerade auf die Toilettensitzerhöhung. Beachten sie bei schräger Montage die erhöhte Abrutschgefahr.

Pflegehinweise für den Benutzer

Reinigung

Zur Reinigung der Toilettensitzerhöhung können handelsübliche Putz- und Desinfektionsmittel verwendet werden. Reiben Sie die Toilettensitzerhöhung mit einem feuchten Lappen ab.

Verwenden Sie keine scharfen oder ätzenden Reinigungsmittel und Reinigungsmittel mit Schleifzusatz.

Überprüfung der Toilettensitzerhöhung durch den Benutzer

Die Toilettensitzerhöhung ist wartungsfrei. Wenn eine Instandsetzung notwendig werden sollte, die Sitzerrhöhung dem Fachhandel übergeben.

Inspektion: Monatlich alle Schrauben und Muttern auf festen Sitz überprüfen ggf. festschrauben.

Störungen/Fehlerbehebung

Zur Störungsbehebung und Fehlerbeseitigung oder bei Beschädigung die Sitzerrhöhung an den Fachhandel übergeben.

Ausgenommen solche Störungen, die durch Reinigung beseitigt werden können.



Dem Fachhändler werden auf Anfrage die notwendigen Informationen und Unterlagen für Reparatur und Instandsetzung zur Verfügung gestellt.

Für Fragen steht Ihnen der Dietz Kundenservice unter der Rufnummer +49 (0) 7248/ 9186 - 0 zur Verfügung.

Entsorgung

Wenn Ihre Toilettensitzerhöhung oder die Umverpackung nicht mehr verwendet wird und entsorgt werden soll, erkundigen Sie sich bei ortsansässigen Entsorgungsunternehmen über die Vorschriften.

Technische Daten

Bestellnummer	000119
Gesamtbreite (cm)	54
Gesamthöhe (cm)	36
Gesamtlänge (cm)	50
Erhöhung der Sitzposition(cm)	8/ 12/ 16
Sitzflächenbreite (cm)	36
Sitzflächentiefe (cm)	41
Öffnung L x B (cm)	28 x 23
Distanz zwischen den Armlehnen (cm)	43
Leergewicht (kg)	4,7
Max. Belastbarkeit (kg)	120

Garantie

Garantieleistungen beziehen sich auf alle Mängel des Produkts, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Zugang der Versandbereitschaftsanzeige, spätestens nach Auslieferung. Von der Gewährleistungspflicht ausgeschlossen sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Desgleichen gilt bei Verwendung von ungeeigneten Pflegemitteln, Schmierölen bzw. Fetten. Bei Beanstandungen ist der vollständig ausgefüllte Garantie-Abschnitt (siehe unten) mit einzureichen.

✂

Garantie- Abschnitt	
Produkt:	Modellbezeichnung
	Seriennummer
Fachhändler:	Datum und Stempel

Senden an:

 **DIETZ**[®]
REHA-PRODUKTE
Reutäckerstrasse 12
D-76307 Karlsbad-Ittersbach