

1



Ziehen Sie an dem roten Griff um das Elektromobil zu entriegeln.

2



Klappen Sie das Elektromobil aus, durch die Lenkung nach vorne zu kippen.

3



Entriegeln Sie das Elektromobil durch den Sitz nach oben zu ziehen und die Lenksäule nach vorne zu drücken. Sie werden ein Klicken hören.




Klappen Sie die Rückenlehne nach oben und das BRIO faltbare Elektromobil ist fertig um Sie rundzufahren!



BRIO
faltbares Elektromobil

1

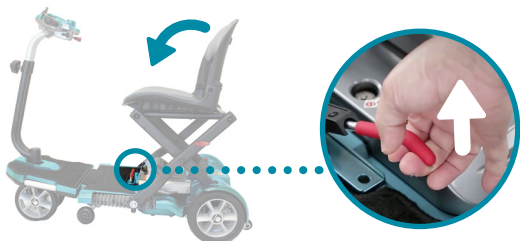

Klappen Sie bevor Sie anfangen die Rückenlehne nach unten und ziehen Sie an dem roten Griff um das Elektromobil zu entriegeln.

2



Klappen Sie das Elektromobil ein, durch die Lenkung nach hinten zu kippen.

3



Entriegeln Sie den Klappmechanismus durch die Lenksäule nach unten zu drücken. Sie werden ein Klicken hören.



Kippen Sie das Elektromobil so, daß Sie den BRIO einfach als einen mobilen Koffer bewegen können.



BRIO
faltbares Elektromobil